

Nordlys™

Vasculaire



Exacting on veins. Easy on skin*.

La configuration vasculaire Nordlys offre des traitements vasculaires très ciblés avec des caractéristiques avancées.¹⁻³

*Dur pour les veines. Doux pour la peau.



Nordlys™
Aesthetics Awards
MEILLEUR APPAREIL
À BASE D'ÉNERGIE
DE L'ANNÉE

Deux applicateurs dédiés aux traitements vasculaires optimisent le système Nordlys™ pour la prise en charge des indications vasculaires courantes et avancées.¹⁻³

- SWT® PR 530
- Nd:YAG 1064 nm

la technologie SWT® (Selective Waveband technology) offre une IPL de précision à spectre court et permet de réaliser des traitements vasculaires plus performants qu'avec une IPL classique.

 **CANDELA®**
Science. Results. Trust.

Deux applicateurs suffisent pour traiter

- 11 indications vasculaires très demandées, des rougeurs du visage aux taches, ainsi que le photorajeunissement de la peau*
- Tous les phototypes I-VI, selon l'applicateur utilisé¹⁻³
- Tous les âges, homme et femme¹⁻³

Nordlys[™] Vasculaire

SWT[®] Caractéristiques	Exacting on Veins* <small>*Dur pour les veines</small>	Easy on Skin* <small>*Doux pour la peau</small>
Double filtre de spectre	<p>Les applicateurs IPL filtrent la lumière aux deux extrémités du spectre. La technologie SWT[®] concentre la lumière autour des pics d'absorption de la mélanine, de l'hémoglobine et de l'oxyhémoglobine. Les impulsions inférieures à la milliseconde nécessitent moins d'énergie pour cibler les chromophores que les impulsions plus longues.²⁻⁴</p> <p>L'applicateur PR 530 (530-750 nm) a un impact à la fois superficiel et plus profond (1-3 mm).</p> <p>(Remarque : les lasers KTP ne traitent que les vaisseaux superficiels⁷).</p>	<p>La bande spectrale émise par l'IPL est hautement sélective, éliminant les longueurs d'ondes indésirable pouvant surchauffer la peau²⁻³</p> <p>L'énergie émise est contenue dans une bande spectrale courte, ce qui permet de réduire les exigences en matière de fluence et améliore le confort du patient.</p> <p>La technologie nécessite jusqu'à 50% de fluence en moins comparativement aux IPL à bande large²⁻⁴</p>
Filtre à eau intégré	<p>Chaque applicateur IPL SWT[®] intègre un circuit d'eau permettant une meilleure protection de la peau. Les longueurs d'onde ciblant l'eau sont absorbées avant d'atteindre la peau. Elles sont ainsi moins susceptibles de cibler l'eau contenue dans la peau.²⁻³</p> <p>Aucun système de refroidissement actif n'est nécessaire.²⁻³</p>	<p>Réduit la chauffe cutanée et limite les risques de brûlures, d'hypopigmentation, d'hyperpigmentation et de cicatrices.²⁻⁴</p> <p>Évite la constriction des vaisseaux causée par le refroidissement externe pour améliorer la visibilité du traitement et son efficacité.³</p>

Pièces à main Nordlys™ Vasculaire

Nd:YAG 1064 nm



Lésions vasculaires (télangiectasies faciales, taches de vin, varicosités des membres inférieurs*, lacs veineux)

Onychomycose

Verrues cutanées bénignes (incision, excision et coagulation)

SWT® PR 530



Lésions vasculaires (télangiectasies, taches de vin, rosacée et rougeurs diffuses)

Photoréjuvenation**

Lésions pigmentaires (trouble pigmentaire, poikilodermie de Civatte)

Acné vulgaire inflammatoire légère à modérée

Amélioration de la texture cutanée


Photoréjuvenation et traitement de l'acné vulgaire améliorés par PDT

* Jusqu'à 3 mm

** Par photorajeunissement, amélioration de la texture et traitement des lésions pigmentaires

REMARQUE : l'applicateur PRS 530 (applicateur plus petit) est également disponible.²

Longueurs d'onde et coefficient d'absorption

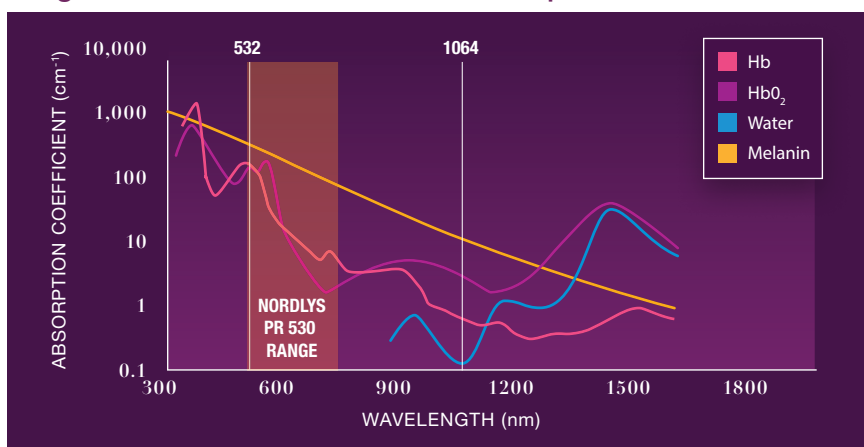

Traiter sans effort

- Courbe d'apprentissage rapide grâce à l'interface guidée et intuitive intégrée ²⁻³
- Des menus axés sur les indications facilitent le traitement ²
 1. Choisissez le phototype
 2. Choisissez le degré de bronzage
 3. Choisissez la taille cible du vaisseau
 4. Le système calcule et suggère les paramètres (impulsion et énergie) pour le traitement
- Les paramètres avancés du mode expert permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement les traitements au fur et à mesure qu'ils se familiarisent avec la plateforme ².
- Le Nd:YAG 1064 nm ajuste automatiquement la taille des spots ²⁻³

Ajouter les technologies incontournables

- Commencez dès aujourd'hui en choisissant des applicateurs vasculaires pour les besoins de vos patients.
- Développez votre plateforme avec de nouveaux applicateurs de traitement Nordlys pour traiter les lésions pigmentaires et le resurfaçage de la peau (Frax 1550™ et Frax 1940™) et même l'épilation¹.

Conçu pour un ROI élevé ³

- Peu de consommables ³
- Aucun refroidissement externe requis ²⁻³
- Pas de kit de colorant ²⁻³
- Fonctionnement silencieux pour des séances confortables ²⁻³

Envisagez la meilleure manière pour répondre aux indications vasculaires.

En savoir plus sur la configuration vasculaire du système Nordlys.

Nordlys™

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Candela ou rendez-vous sur www.candelamedical.com

“Le système Nordlys™ offre une excellente ergonomie ; il est facile de se déplacer dans la salle de traitement, de saisir des données ou de modifier des paramètres pendant la séance.”

— Prof. Agneta Troilius Rubin, MD, Dermatologist, Malmö, Sweden

